


Modèle GMH-B3

Version 1.1

EZ Health^{MD} Oracle^{MD} Onyx^{MC}

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE EZ HEALTH^{MD} ORACLE^{MD} ONYX^{MC}

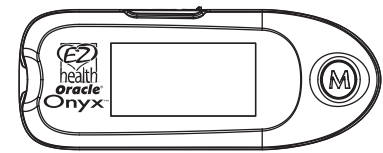

MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE AVANT D'UTILISER

Félicitations pour avoir acheté le Système de surveillance de la glycémie EZ Health[™] Oracle[™] Onyx[™]! Ce système consiste en deux (2) produits principaux : le lecteur et les bandes réactives. Ces produits ont été conçus, testés et prouvés pour travailler ensemble en tant que système pour produire des résultats de test de glycémie précis. N'utilisez que les bandes réactives EZ Health[™] Oracle[™] (code de produit GMH-B1550 ou GMH-B15100) avec votre lecteur EZ Health[™] Oracle[™] Onyx[™].

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Le lecteur et l'autopiqueur doivent être utilisés sur un seul patient. Ne les partagez pas avec n'importe qui, y compris les membres de la famille! Ne les utilisez pas sur plusieurs patients!

*Toutes les pièces de la trousse présentent des risques biologiques et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses, même après les avoir nettoyées et désinfectées.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter

1.*FDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication" (2010)

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>

2.*CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens" (2010)

<http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick-DevicesBGM.html>

Utilisation prévue

Ce système est conçu pour usage externe seulement (diagnostic in-vitro) par des personnes souffrant de diabète à la maison seulement. Il est utilisé à des fins de mesures quantitatives de glycémie dans des échantillons de sang capillaires prélevés à partir de la paume de la main, de l'avant-bras, de l'arrière-bras, du mollet, de la cuisse ou des doigts. Il n'est pas conçu pour diagnostiquer ou afficher le diabète mellitus ou pour être utilisé sur des nouveau-nés. Il est conçu pour être utilisé par une seule personne et ne devrait pas être partagé.


Ce système vous fournit des résultats sanguins équivalents. L'ensemble standard pour ce système comprend :

1. Lecteur EZ Health[™] Oracle[™] Onyx[™]
2. Guide de l'utilisateur
3. Sac de rangement
4. Lancettes
5. Carte de garantie
6. Lancette EZ Health[™] Oracle[™] avec un couvercle clair

REMARQUE

Assurez-vous que votre système ne soit pas ouvert avant de l'utiliser et qu'il contienne toutes les pièces mentionnées dans la liste ci-haut. Si une de ces conditions surviennent, veuillez retourner votre système à l'endroit où vous l'avez acheté.


APPARANCE ET PRINCIPALES FONCTIONS DU LECTEUR

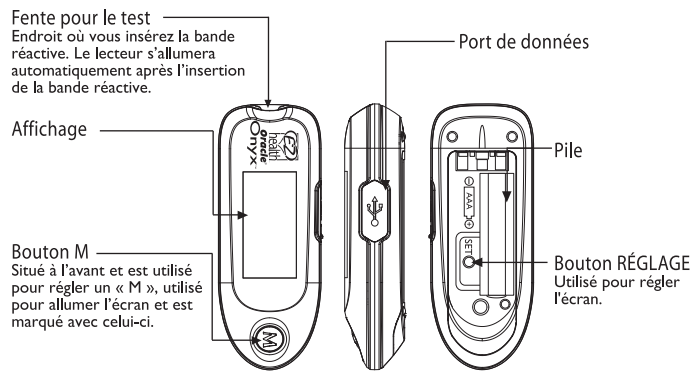

REMARQUE

Le lecteur s'éteindra automatiquement après 180 secondes d'inactivité ou vous pouvez appuyer sur le bouton **M** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

ÉCRAN DU LECTEUR

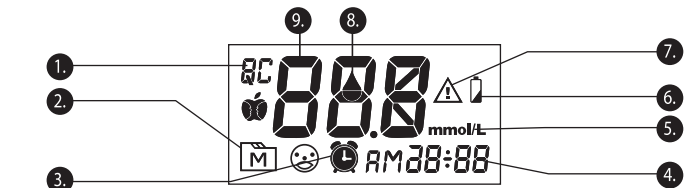

1. Mode de mesure
2. Mémoire
3. Alarmes
4. Mois/Jour/Heure/Minute
5. Unités de mesure
6. Symbole de la pile
7. Avertissement d'erreur
8. Symbole de goutte sang
9. Zone de résultat de test

L'unité de mesure est fixée à mmol/L.

BANDES RÉACTIVES GMHB1550 ou GMHB15100

Votre système mesure la quantité de sucre (glucose) dans votre sang. Le sang est appliqué au trou absorbant de la bande réactive et est automatiquement vidé dans la cellule de réaction où cette réaction prendra place.

La bande réactive comprend les parties suivantes :

Barres de contact

Insérez cette extrémité de la bande réactive dans le lecteur. Insérez la bandelette de test jusqu'à ce qu'il ne sera plus pousser dans le lecteur.

Manipulation de la bande réactive

Tenez cette partie pour insérer la bande réactive dans la fente.

Fenêtre de confirmation

Endroit où vous confirmez si la bonne quantité de sang a été appliquée sur le trou absorbant situé dans la bande.

Trou absorbant

Appliquez une goutte de sang ici. Le sang sera aspiré automatiquement.

VÉRIFICATION DU SYSTÈME AVEC LES SOLUTIONS TÉMOINS

Nos solutions témoins contiennent une quantité connue de glucose qui réagit au contact les bandes réactives. En comparant les résultats de votre test de solution témoin au niveau attendu imprimé sur l'étiquette du flacon de bandes réactives, vous pouvez vérifier que le lecteur et les bandes réactives fonctionnent bien ensemble en tant que système et que vous effectuez le test correctement. N'utilisez seulement que les solutions témoins EZ Health[™] Oracle[™] ou EZ Health[™] Autocode[™].

COMMENT EFFECTUER UN TEST AVEC UNE SOLUTION TÉMOIN ?


ÉTAPE 1. Insérer la bande réactive

Insérez une bande réactive avec la porte de test avec les extrémités des barres de contact en premier et vers le haut. (Les barres de contact doivent être insérées en entier dans le lecteur ou vous obtiendrez des résultats imprécis). Le lecteur s'allume automatiquement et affiche la séquence suivante :

Affichage ACL entière → CHK

→ clignotant "▲"

Tandis que le symbole « ▲ » apparaît sur l'écran, appuyez **M** et « QC » apparaîtra sur l'écran. Une fois le signe « QC » affiché sur l'écran, le lecteur stockera le résultat de votre test dans la mémoire sous « QC ». Si vous décidez de ne pas effectuer de test de solution témoin, appuyez sur le bouton **M** et le signe « QC » disparaîtra.

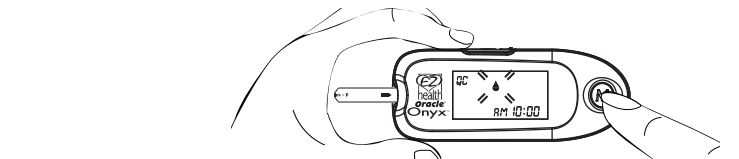

ATTENTION

Lorsque vous effectuez un test de solution témoin, vous devez le marquer afin que le résultat du test NE soit PAS inclus avec les RÉSULTATS DE TEST de glycémie stockés dans la mémoire. Sauter cette étape mélangera les résultats du test de solution témoin à ceux du test de glycémie contenus dans la mémoire.

ÉTAPE 2. Appliquer la solution témoin

Brassez bien le flacon de solution témoin. Retirez le couvercle de la bouteille de solution témoin. Placez le couvercle sur une surface plate. Pressez le flacon, jetez la première goutte et essuyez l'extrémité du distributeur pour prévenir toute contamination. Repressez la bouteille pour obtenir une autre goutte et placez-la sur le dessus du couvercle.

Tenez le lecteur afin qu'il touche la goutte avec le trou absorbant de la bande réactive et la goutte entrera automatiquement dans la bande réactive. Assurez-vous que la fenêtre de confirmation soit entièrement remplie. Le lecteur va commencer un comptage.

ATTENTION

Pour éviter toute contamination de la solution témoin avec le contenu de la bande réactive, il est recommandé de jeter la première goutte et de placer une autre goutte de solution témoin sur une surface propre d'abord. Ensuite, touchez la goutte avec la bande réactive.

ÉTAPE 3. Vérification des résultats

Une fois le lecteur à 0, le résultat de la solution témoin apparaîtra. Comparez ce résultat avec le niveau imprimé sur le flacon de bande réactive. Il doit se trouver dans ce niveau.

LES QUATRE (4) MODES DE MESURE

Le lecteur vous fournit quatre (4) modes de mesure : General, AC, PC et QC.

Modos	Utiliser lorsque
Tests généraux	En tout temps sans regarder le temps passé depuis le dernier repas
CA/ca.	Aucune nourriture prise pendant au moins les dernières 4 heures
PC	2 heures après un repas
QC	Tester avec la solution témoin

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre si vous :

1. Commencez avec le lecteur éteint. Insérez une bande réactive dans le lecteur. L'écran affiche une goutte de sang clignotante.

2. Appuyez sur **M** pour passer du mode General, à AC, à PC et à QC.

▲ AM 10:00	AC ▲ AM 10:00	PC ▲ AM 10:00	QC ▲ AM 10:00
8-10	8-10	8-10	8-10

ÉVALUATION DE VOTRE SANG

Assurez-vous de lire cette section ainsi que la notice de l'emballage des bandes réactives dans la boîte de bandes réactives attentivement avant de faire le test. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces requises pour effectuer le test.

À PROPOS DU TEST DU SITE ALTERNATIF (AST)

Important : Il y a des limites à effectuer le AST. Veuillez consulter votre médecin avant d'effectuer le AST.

Qu'est-ce que le AST? Le test du site alternatif (AST) signifie que les personnes utilisent des parties du corps autres que les doigts pour vérifier leurs niveaux de glycémie. Ce système vous permet de faire le test en utilisant la paume, l'avant-bras, l'arrière-bras, le mollet ou la cuisse, et les résultats seront équivalents au test effectué avec le bout du doigt.

Quels sont les avantages? Le bout des doigts ressent de la douleur plus facilement en raison des nombreux arrêts nerveux (récepteurs). À d'autres endroits du corps, étant donné que les arrêts nerveux ne sont pas tellement concentrés, vous ne ressentirez pas autant de douleur que sur le bout du doigt.

Quand utiliser l'AST? L'alimentation, la prise de médicament(s), le stress et l'activité physique peuvent affecter vos niveaux de glycémie. Le sang capillaire sur le bout du doigt reflète ces changements plus vite que le sang capillaire sur les autres parties du corps. Les résultats liés au site d'emplacement peuvent varier des résultats obtenus pour le bout du doigt lorsque les niveaux de glucose changent rapidement (par exemple : après un repas, après la prise de l'insuline, pendant ou après l'exercice.) Donc, lorsque vous évaluez la glycémie pendant ou immédiatement après un repas, l'activité physique ou après avoir pris de l'insuline, **prélevez le sang sur le doigt seulement.**

Nous vous recommandons fortement d'effectuer l'AST SEULEMENT dans les intervalles suivants :

- Dans un état d'avant-repas ou d'appétit (plus de 2 heures depuis le dernier repas).
- Deux heures ou plus après avoir pris de l'insuline.
- Deux heures ou plus après avoir fait de l'exercice.

Ne vous fiez pas aux se fier sur les résultats de test effectué sur un site alternatif de prélèvement, mais utiliser les échantillons prélevés sur le bout du doigt si une des conditions suivantes surviennent :

- vous pensez que votre taux de sucre dans le sang est faible;
- vous n'êtes pas conscient des symptômes lorsque vous êtes dans un état d'hypoglycémie;
- les résultats de test ne correspondent pas à votre sentiment de bien-être;
- après un repas;
- après l'exercice;
- pendant une maladie;
- pendant des périodes de stress.

Avertissement :

Pour réduire le risque d'infection :

- *Le lecteur et l'autopiqueur doivent être utilisés une seule fois. Ne partagez jamais une lancette ou un autopiqueur.
- *Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile. Les lancettes doivent être utilisées une seule fois.
- *Évitez de mettre de la lotion pour les mains, des huiles, de la saleté ou des débris dans ou sur les lancettes ou l'autopiqueur.

*Lavez et séchez vos mains après avoir manipulé le lecteur, l'autopiqueur et les bandes réactives afin d'éviter toute infection. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et Désinfection ».

*Si une deuxième personne, qui aide l'utilisateur, fait fonctionner le lecteur, ce dernier ainsi que l'autopiqueur doivent être décontaminés avant que cette deuxième personne ne l'utilise.

Le partage de l'autopiqueur et des lancettes peuvent augmenter le risque de contracter des maladies infectieuses. L'autopiqueur ne devrait jamais être utilisé par plus d'une personne.

ÉTAPE 1. Insérez la bande réactive

Insérez une bande réactive avec la fente de test avec les extrémités des barres de contact en premier et vers le haut. Les barres doivent être entièrement insérées dans le port pour obtenir un résultat précis. Le lecteur s'allume automatiquement et affiche le symbole de goutte de sang.

Affichage ACL

→ CHK

→ "▲" clignotant



ÉTAPE 2. Sélectionnez le mode de mesure approprié en appuyant sur **M**.

Pour sélectionner le mode de mesure AC, PC ou Gen., veuillez vous référer à la section "QUATRE MODE DE MESURE".

ÉTAPE 3. Application d'un prélèvement sanguin

Prélevez une goutte de sang d'au moins 0,7 µL à l'aide d'un autopiqueur. Utilisez le couvercle clair pour les sites autres que les doigts et référez-vous à l'étiquette de l'emballage de la bande pour obtenir plus de détails.

Lorsque le symbole « ▲ » apparaît sur l'écran, touchez la goutte de sang avec le trou absorbant de la bande réactive. Ne frottez pas la bande réactive avec votre doigt ou n'essayez pas d'appliquer un échantillon qui a débordé.

Le sang doit complètement remplir la fenêtre de confirmation avant que le lecteur ne se mette à compter. Si la fenêtre de contamination n'est pas entièrement remplie avant que le lecteur ne commence le décompte, n'ajoutez pas plus de sang sur la bande réactive. Jetez la bande réactive et recommencez. Si vous éprouvez des difficultés à remplir la bande réactive, veuillez communiquer avec votre agent local pour obtenir de l'aide.

Avertissement :

Pour réduire le risque d'infection :

- * Le lecteur et l'autopiqueur doivent être utilisés une seule fois. Ne partagez jamais une lancette ou un autopiqueur.
- * Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile. Les lancettes doivent être utilisées une seule fois.
- * Évitez de mettre de la lotion pour les mains, des huiles, de la saleté ou des débris dans ou sur les lancettes ou l'autopiqueur.
- * Lavez et séchez vos mains après avoir manipulé le lecteur, l'autopiqueur et les bandes réactives afin d'éviter toute infection. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et Désinfection ».
- * Si une deuxième personne, qui aide l'utilisateur, fait fonctionner le lecteur, ce dernier ainsi que l'autopiqueur doivent être décontaminés avant que cette deuxième personne ne l'utilise.

Le partage de l'autopiqueur et des lancettes peuvent augmenter le risque de contracter des maladies infectieuses. L'autopiqueur ne devrait jamais être utilisé par plus d'une personne.



REMARQUE

Si vous n'appliquez pas de prélèvement sanguin à la bande réactive dans les 3 minutes, le lecteur s'éteindra. Vous devez retirer la bande réactive et la réinsérer dans le lecteur pour recommencer le test.



Avertissement :


Veuillez ne pas changer votre traitement basé sur les résultats sans avoir d'abord consulté votre médecin.

Éteignez le lecteur en retirant la bande réactive. Jetez la bande et la lancette utilisées selon vos règlements municipaux.

UTILISATION DE LA MÉMOIRE DU LECTEUR

Afficher les résultats
Votre lecteur garde les 150 résultats de test de glycémie les plus récents avec la date et l'heure en mémoire. Vous pouvez revoir les résultats de test dans la mémoire en suivant facilement ces étapes.


ÉTAPE 1. Entrer en mode Mémoire
Avec le lecteur éteint, appuyez deux fois sur le bouton **M**. Le premier résultat de teste apparaîtra, indiquant que vous êtes en mode de mémoire. Si vous continuez à appuyer sur **M**, vous pouvez alors revoir les 150 derniers tests dans la mémoire. Lorsque vous utilisez le lecteur pour la première fois, « --- » apparaîtra, indiquant qu'il n'y a pas de résultat de test dans la mémoire.

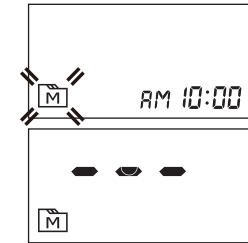

ÉTAPE 2. Rappel des résultats de test
Après le dernier résultat de test, le résultat le plus récent apparaît avec la date et l'heure. Appuyez sur **M** pour revoir vos 150 derniers résultats de test en ordre. Lorsque la mémoire est pleine, le plus ancien résultat s'efface au fur et à mesure que le plus récent est ajouté.




ÉTAPE 3. Quitter le mode Mémoire
Appuyez sur **M** pendant trois secondes pour éteindre le lecteur.

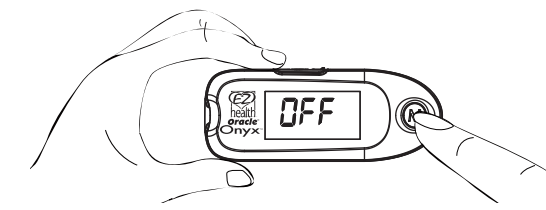


RÉGLAGE DU LECTEUR ET SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE

Commencez avec le lecteur éteint. Ensuite, appuyez sur le bouton SET situé à l'arrière. Le lecteur est maintenant en mode de réglage.

ÉTAPE 1. Réglage de l'année
L'année apparaîtra en premier, avec l'année à régler clignotante. Appuyez sur **M** et relâchez-le pour ajouter une année. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur **M** plus longtemps. Une fois la bonne année affichée, appuyez sur le bouton SET et la date apparaîtra sur l'écran avec le segment du mois clignotant.

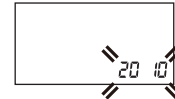


ÉTAPE 2. Réglage du mois
Appuyez sur le bouton **M** et relâchez-le jusqu'à ce que le bon mois apparaisse. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur **M** plus longtemps. Une fois le bon mois affiché, appuyez sur le bouton SET et la minute clignotera.

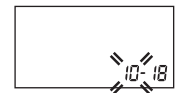

ÉTAPE 3. Réglage du jour
Appuyez sur le bouton **M** et relâchez-le jusqu'à ce que le bon jour apparaisse. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur **M** plus longtemps. Une fois le bon jour affiché, appuyez sur le bouton SET et l'heure apparaîtra sur l'écran avec le segment de l'heure clignotant. *Pour régler l'heure, vous devez d'abord saisir la date.




ÉTAPE 4. Sélection de l'horloge de 12 heures ou de 24 heures
Appuyez sur **M** et relâchez-le pour sélectionner l'horloge de 12 heures ou de 24 heures. Il y a différents formats de présentation d'heure. Si vous sélectionnez 12 heures, AM et PM s'afficheront à côté de l'heure. Si vous sélectionnez 24 heures, le format de l'heure sera de 00 : 00 à 23 : 59 sans affiché AM ou PM.

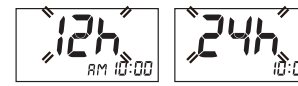


Après avoir sélectionné 12 heures ou 24 heures, appuyez sur le bouton SET et ensuite, l'heure clignotera sur l'écran.

ÉTAPE 5. Régler l'heure
Appuyez sur **M** et relâchez-le pour ajouter une heure. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur **M** plus longtemps. Une fois la bonne heure affichée, appuyez sur le bouton SET et la minute clignotera.

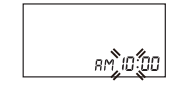

ÉTAPE 6. Réglage des minutes.
Appuyez sur **M** et relâchez-le pour ajouter une minute. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur **M** plus longtemps. Une fois la bonne minute affichée, appuyez sur le bouton SET pour saisir le mode de suppression de la mémoire.

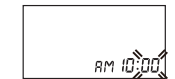

ÉTAPE 7. Supprimer les résultats.
Avec le symbole "no" clignotant sur l'écran, vous pouvez facilement supprimer tous les résultats stockés en mémoire en appuyant à nouveau sur **M**. Le lecteur affichera "oui". Ensuite, appuyez sur le bouton SET pour supprimer tous les résultats et "—" s'affichera.



Si vous ne désirez pas supprimer les résultats, n'appuyez sur **M**, sur le bouton SET pour saisir le réglage de l'alarme.

ÉTAPE 8. Réglage de l'Alarme de rappel
Vous pouvez régler une ou toutes les alarmes de rappel (1 - 4). Le lecteur affiche "On" ou "OFF" et **C**, appuyez sur **M** pour allumer ou éteindre pour régler la première alarme de rappel. Appuyez sur **M** pour sélectionner "On" et sur SET pour régler l'heure. Lorsque l'heure clignote, appuyez sur **M** pour ajouter une heure. Appuyez sur SET pour confirmer et passer au minutes, appuyez sur **M** pour une minute. Maintenez **M** enfoncé pour en ajouter plus rapidement. Appuyez sur SET pour confirmer et passer au prochain réglage de l'alarme.



Si vous ne désirez pas régler une alarme, appuyez sur SET pour passer cette étape. Si vous désirez éteindre l'alarme, trouvez le numéro de l'alarme en appuyant sur SET dans le mode de réglage, appuyez sur **M** pour passer de "ON" à "OFF".

Au moment où votre alarme sonne, le lecteur émettra un "bip" et s'allumera automatiquement. Vous pouvez appuyer sur **M** pour éteindre l'alarme et insérer une bande réactive pour commencer le test. Si vous n'appuyez pas sur **M**, le lecteur émettra un "bip" pendant 2 minutes avant de s'éteindre. Si vous ne désirez pas effectuer de test en ce moment, appuyez sur **M** pour éteindre le lecteur.




TÉLÉCHARGEMENT DES RÉSULTATS SUR UN ORDINATEUR

Vous pouvez utiliser le lecteur avec un câble USB et le Système du logiciel de gestion du diabète EZ Health™ pour lire vos résultats de test sur votre ordinateur personnel. Pour obtenir un câble USB, veuillez communiquer avec nous ou avec l'endroit de l'achat pour obtenir de l'aide.

1. Installation du logiciel
Pour télécharger le Logiciel de gestion du diabète EZ Health™, veuillez visiter notre Programme Contrôler votre santé sur notre site Web au <http://www.oracdiabetes.com>.

2. Branchement à un ordinateur personnel
Branchez le câble USB au port USB de votre ordinateur. Avec le lecteur éteint, branchez l'autre extrémité du câble USB au port de données du lecteur. « USB » apparaîtra sur l'écran, indiquant que le lecteur est en mode de communication.

3. Transmission des données
Pour transmettre les données, suivez les directives décrites avec le logiciel. Les résultats transférés comprendront la date et l'heure. Retirez le câble et le lecteur s'éteindra automatiquement.

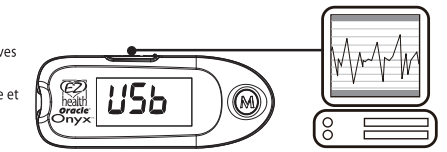

Avertissement :
Lorsque le lecteur est branché au PC, vous ne pouvez pas effectuer de test de glycémie.

ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR

Pour éviter que le lecteur et les bandes réactives n'attirent la saleté, les poussières ou d'autres contaminants, veuillez laver et sécher vos mains avant de l'utiliser.

Nettoyage
1. Pour nettoyer l'extérieur du lecteur, l'essuyer avec un chiffon mouillé à l'eau du robinet ou avec un produit nettoyant doux, puis sécher l'appareil avec un chiffon doux et sec. NE PAS rincer à l'eau.
2. NE PAS utiliser de solvant organique pour nettoyer l'appareil.

Rangement du lecteur
• Stocker ou transporter toujours l'appareil dans son étui de rangement original.
• Éviter de l'échapper et tout impact lourd.
• Éviter les rayons directs du soleil et une humidité élevée.

ENTRETIEN DE VOS BANDES REACTIVES

- Conditions de rangement : 4 °C à 40 °C (39,2 °F à 104 °F), en-dessous de 85 % d'humidité relative. Ne pas congeler.
- Ranger les paquets de bandes réactives dans un endroit frais sec. Garder loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Après avoir retiré une bande réactive du flacon, refermer immédiatement le bouchon du flacon hermétiquement.
- Toucher la bandelette réactive avec des mains propres et sèches.
- Utiliser chaque bande réactive immédiatement après l'avoir retirée du flacon.
- Écrire la date d'ouverture sur l'étiquette du flacon lors de la première ouverture. Jeter les bandes réactives restantes après 3 mois.
- N'e pas utiliser les bandes réactives au-delà de la date d'expiration. Ce qui peut produire des résultats inexacts.
- Ne pas plier, couper ou modifier d'aucune façon une bande réactive.
- Conserver le flacon de bandelettes réactives hors de la portée des enfants étant donné que le couvercle et la bande réactive peuvent causer un risque d'étouffement. En cas d'ingestion, consulter sans tarder un médecin pour obtenir de l'aide.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à la notice écrite sur la paquette de bandes réactives.

AFFICHAGE DES MESSAGES ET DU GUIDE DE DÉPANNAGE

Ce qui suit résumé les messages d'affichage. Si votre lecteur affiche un message d'erreur, veuillez suivre les actions pour le message d'erreur, tel que décrit dans le tableau suivant. Si le problème persiste, veuillez appeler votre agent local pour obtenir de l'aide.

Message	Signification	Action
	Le symbole apparaît avec ce message. Ce symbole signifie que la pile ne fournira pas assez d'alimentation pour effectuer un test.	Remplacer immédiatement la pile.
	Une bande réactive utilisée est insérée.	Refaire le test avec une nouvelle bande réactive. Si le message d'erreur apparaît encore, veuillez appeler votre agent local pour obtenir de l'aide.
	La température de l'environnement, ou la bande réactive se trouve à l'extérieure de l'étendue du système d'exploitation. Vous ne pouvez pas effecteur de test jusqu'à ce que le lecteur et la bande réactive se trouvent dans l'étendue d'opération de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F).	Refaire le test une fois que le lecteur et la bande réactive aient atteint la température d'opération.
	Problème avec le lecteur	Relire les instructions et essayez avec une nouvelle bande réactive. Si le problème persiste, veuillez appeler votre agent local pour obtenir de l'aide.
	Vous pouvez avoir retiré la bande réactive après avoir appliqué le sang au trou absorbant.	Garder la bande réaction dans le lecteur après qu'elle ait absorbé le sang jusqu'à ce que le lecteur affiche le résultat de test.
	Erreur de système	Communiquez avec votre agent de service local pour obtenir de l'aide.

MESSAGE	SIGNIFICATION		
	Apparaît lorsque la glycémie est < 1,1 mmol/L		
	AC Apparaît lorsque la glycémie est entre 4,0 – 7,0 mmol/L.	PC Apparaît lorsque la glycémie est entre 5,0 – 10,0 mmol/L.	Gen Apparaît lorsque la glycémie est entre 4,0 – 10,0 mmol/L.
	AC Apparaît lorsque la glycémie est entre 1,1 – 3,9 et 7,1 – 33,3 mmol/L.	PC Apparaît lorsque la glycémie est entre 1,1 - 4,9 mmol/L et 10,1 - 3,3 mmol/L.	Gen Apparaît lorsque la glycémie est entre 1,1 3,9 mmol/L et 10,1 - 3,3 mmol/L.
	Apparaît lorsque la glycémie est > 33,1 mmol/L		

Pour des résultats de test questionnables, veuillez lire l'étiquette de l'emballage de bandes réactive pour obtenir l'information importante.

PARAMÈTRES

Dimensions : 93 po (L) x 36 po (H) x 21,3 po (H)
Poids : 45,4 (pile comprise)
Source d'alimentation : Une pile alcaline de type AAA (pour au moins 500 mesures)
Affichage : LCD ou ACL
Mémoire : 150 résultats de mesure avec la date et l'heure
Détection automatique de l'insertion de l'électrode
Réaction automatique du temps de réaction
Avertissement de température
Conditions de fonctionnement : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F), inférieure à 85 % H.R.
Conditions de stockage/transport : -20 °C – 40 °C (-4 °F – 104 °F), inférieure à 95 % H.R.
Unités de mesure : mmol/L
Plage de mesure : 1,1 – 33,3 mmol/L

Lorsque la pile est faible, vous pouvez toujours effectuer jusqu'à 50 tests.

Cet appareil a été certifié pour satisfaire aux exigences électriques et de sécurité de : IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1, EN 61326-2-6.

INFORMATION SUR LES SYMBOLES

Symbole	Référent	Symbole	Référent
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Fabricant
	Ne pas réutiliser		Numéro de série
	Consulter les instructions d'utilisation		Mise en garde, consulter les documents accompagnatifs
	Ne pas exposer à la lumière directe du soleil		Risques biologiques
	Protéger contre l'humidité		Utiliser dans les 3 mois après l'ouverture
	Limite de température		stérilisé par irradiation
	Utiliser par/Date d'expiration		
	Lot de code		

Tremblay Harrison Inc.
1684 Dufferin Street
Toronto, Ontario
Canada
M6H 3M1

Toll Free: 1-866-829-7926

Pour auto-évaluation

311-4235300-002